

お客様各位

シーテック株式会社

【ピットシュ！】ご使用上の注意について

この度は、【ピットシュ！】をご購入いただき、誠に有難うございます。
下記のお問合せが増えておりますので、ご使用上の注意としてご案内させていただきます。
【ピットシュ！】が皆様の感染症予防のお役に立てましたら幸いです。

1. 温度測定について

【ピットシュ！】は赤外線センサーにより表面温度を測定します。表面温度は医療用体温計で測定した実体温より低くなる他、外気温など測定環境の影響を受けます。

* 他の非接触電子体温計、サーモカメラも同様です。

Low や 34℃台など低温で表示される場合は、【ピットシュ！】で温度測定をする部位を、外気の影響の少ない衣服等で覆われた手首等にて測定してください。

また、医療用体温計との温度差を調整する機能が搭載されています。入口等でのご利用の際は、設定温度を差分(1~2℃)上げてご利用ください。

【ピットシュ！】は、外部環境の影響を受けない場所にてご使用をお勧めします。

【ピットシュ！】を設置している場所が、室外や直射日光が当たる場所など、外部環境の影響を受ける場所でご使用の場合、測定温度が正しく表示されない場合があります。
直射日光や外気の影響の少ないオフィス内でのご使用をお勧めいたします。

2. 利用される液体(消毒液)について

ジェルタイプはご利用いただけません。液体タイプをご利用ください。

全ての液体でのテストを実施しておりません。液体の成分、濃度等により【ピットシュ！】の容器や器具類を傷めたり汚れが付着する場合がございます。、別途ご購入される液体については、液体をご購入されます販売店にご確認ください。

* 液体の成分、濃度等による故障は保証の対象外となります

3. 検温センサーの防水対応について

【ピットシュ！】は防水ではありませんので水洗いしないでください。汚れた場合は清潔な布で拭き取ってください。温度センサーは綿棒などで軽く拭き取るようにしてください。また、検温の際、液体が温度センサーに入らないようご注意ください。
温度センサー内が湿ったり、液体が溜まったりすると故障の原因となります。

4. 取扱い説明書

最新版の取扱い説明書は、ピットシュのホームページ上でも確認いただけます。

ご利用の際は、併せてご確認ください。

<https://www.swiftechie.com/pdf/instruction.pdf>

以上